


Softform[®] Premier Active 2

com compressor Active 2 RX

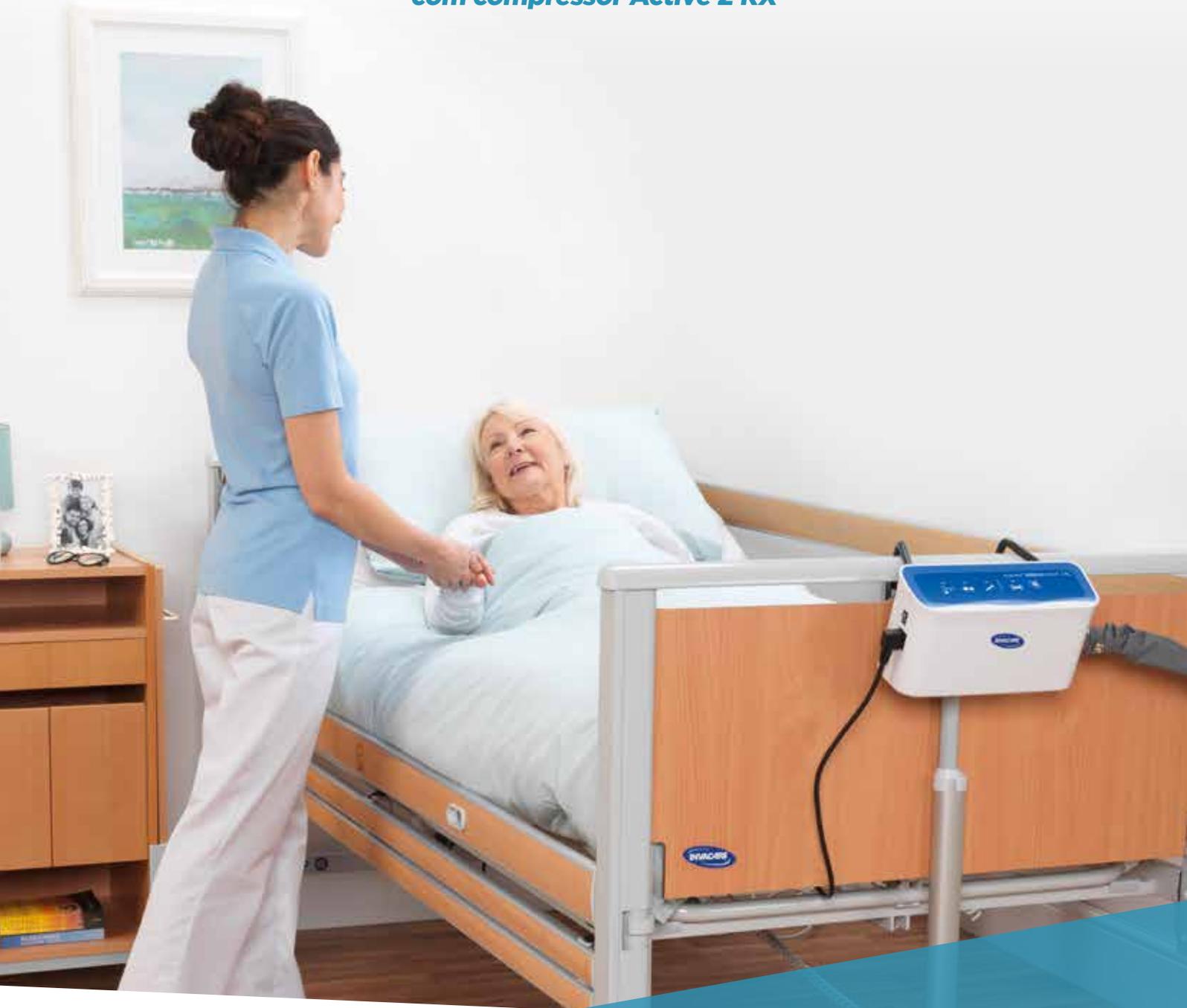

A solução mais completa

FÁCIL DE USAR | COMPRESSOR DIGITAL | CONSTRUÇÃO MODULAR



Um colchão estático que rapidamente se transforma em dinâmico

Foi com o objetivo de proporcionar aos profissionais de saúde uma superfície de apoio terapêutico - oferecendo vários níveis de alívio de pressão - que adicionamos o **Compressor Active 2 RX** ao colchão líder **Softform Premier** para criar o **Softform Premier Active 2**.

Ao conectar o compressor ao colchão, o utilizador mantém-se numa superfície de apoio adequada e fica com um nível de proteção aumentado.

Ao trabalhar em conjunto com o colchão de espuma recortada **Softform Premier**, as células de ar que vão-se enchendo e esvaziando alternadamente para garantir um alívio de pressão maior, estimulando também a circulação sanguínea.

Superfície estática "risco muito elevado"


A camada superior de espuma recortada ajuda à gestão do microclima e redistribuição da pressão, oferecendo conforto e efetiva redistribuição da pressão para utilizadores em "risco muito elevado" de desenvolver úlceras por pressão. A proteção da superfície de apoio estática é facilmente aumentada com a adição do compressor Active2 RX que vai ajudar na prevenção e/ou tratamento de situações de úlceras por pressão mais severas.

Uma solução completa centrada no utilizador

O **Softform Premier Active 2** combina as qualidades de redistribuição da pressão da espuma recortada e das células de ar inferiores que podem ser ativadas consoante as necessidades, para proporcionar uma terapia ativa.

Esta construção assegura que o utilizador está sempre suportado por uma espuma superior envolvente, quer o compressor (a alimentar as células de ar) esteja ligado ou desligado. A espuma superior confortável proporciona efetiva redistribuição da pressão e assegura um conforto permanente.

*(NICE Clinical Guideline 179, September 2014)

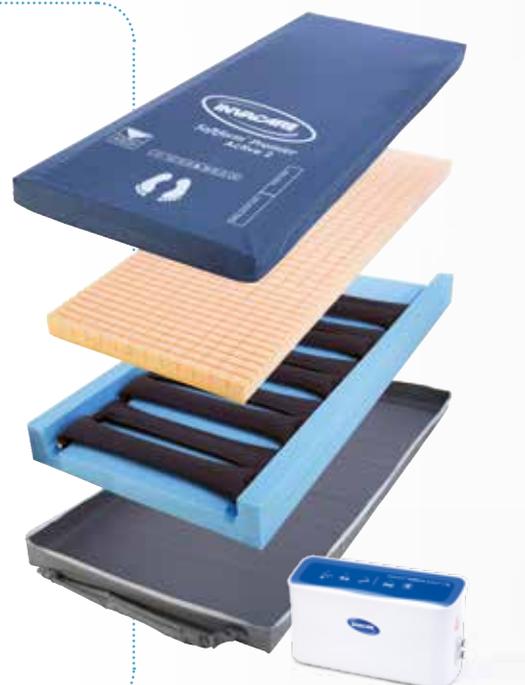

5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Desde a construção modular do colchão ao compressor...

1

Superfície estática com espuma superior

- ▶ Em caso de falha de energia, o utilizador, que continua com elevado risco de desenvolver úlceras por pressão, fica na mesma numa superfície preventiva.



2

Plug'n'Play Compressor digital


- ▶ Uma interface de utilização intuitiva torna-o fácil de configurar e usar.





3 Poupança graças à Construção modular

- ▶ Todos os componentes são facilmente substituíveis, tornando o investimento interessante a longo prazo.

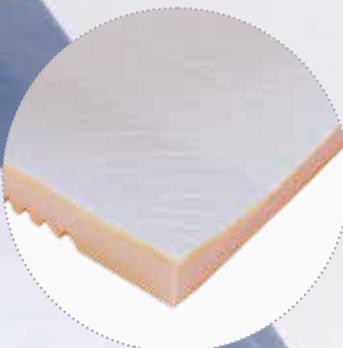

4 Reduz as forças de cisalhamento com o mecanismo de deslize

- ▶ A película deslizante existente na parte inferior da camada da espuma recortada reduz significativamente as forças de cisalhamento habitualmente provocadas pela articulação do estrado da cama elétrica. A EPUAP sugere que evite a exposição da pele tanto à pressão como às forças de cisalhamento, pois são os fatores que mais contribuem para o desenvolvimento das úlceras por pressão (EPUAP, 2014).



5 Sistema de auto-ajuste

- ▶ Não são necessários ajustes de pressão, o compressor Active 2RX adapta-se às necessidades do utilizador.

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.



Largura ▼



Comprimento ▼



Altura ▼



Peso total de produto ▼



Peso máx. utilizador ▼



Temperatura máx. lavagem ▼

Colchão Premier Active 2

830-900mm
(intervalos de 10mm)

1810-2100mm
(intervalos de 10mm)

152 mm

14 kg

247 kg

80°



Profundidade ▼



Largura ▼



Altura ▼



Peso ▼

Compressor Active 2 RX

105 mm

275 mm

155 mm

1.75 kg

Cor ▼



Azul

Por favor tenha em atenção que a cor pode variar da acima apresentada.

Dados regulamentares ▼

Colchão fabricado de acordo com:

European Standard: BS EN 597-1 Cig
European Standard: BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5.

Compressor:

Nível de ruído: ≤ 24 dB
Ciclos: 10 minutos (1 em 2 ciclos)

Norma de regulamentos de incêndio:

BS7177:2008

Outras info ▼

- ▶ Superfície de espuma superior recortada aos cubos
- ▶ Suporte ativo quando necessário
- ▶ Clinicamente comprovado para todas as categorias de úlceras por pressão
- ▶ Adequado para utilizadores com elevado e muito elevado risco
- ▶ Peso máximo de utilizador 247 kg
- ▶ Vários tamanhos disponíveis

Os cuidados de enfermagem são essenciais na prevenção de úlceras por pressão. Este colchão vai contribuir positivamente para o resultado do plano de prevenção das úlceras por pressão.

A educação, julgamento clínico e ações com base no planeamento sobre a vulnerabilidade são fatores fundamentais na prevenção de úlceras por pressão. Pode ser usada uma escala de avaliações como método formal de risco de desenvolvimento de úlceras por pressão, e deve ser usada em conjunto com uma avaliação informal (julgamento informal de enfermagem).

Tel.: 225 1930360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®